



Suma® Med Alu L10

Flydende maskinopvaskemiddel til blødt og
middelhårdt vand, aluminiumsikkert

Fordele

- Sikkert at anvende på aluminium.
- Fjerner effektivt besmudsninger på instrumenter samt fedtbelægninger og indtørrede madrester.
- Anvendeligt i blødt som middelhårdt vand.
- Et koncentreret produkt, som giver god brugsøkonomi.

Beskrivelse

Suma Med Alu L10 er et koncentreret flydende maskinopvaskemiddel, specielt formuleret til effektiv fjernelse af besmudsning i blødt og middelhårdt vand.

Egenskaber

Suma Med Alu L10 er et flydende opvaskemiddel, som er velegnet til anvendelse på en lang række instrumentopvaskemaskiner samt almindelige opvaskemaskiner. Produktet er primært udviklet til blødt og middelhårdt vand. Den kemiske sammensætning af alkali og kalkbindere bevirker, at produktet effektivt fjerner besmudsning og korrosionsinhibitorer gør produktet velegnet til letmetaller som aluminium.

Brugsanvisning

Suma Med Alu L10 doseres normalt gennem Diversey's automatiske doseringsanlæg. Produktet kan ligeledes anvendes i eventuelt indbygget doseringsanlæg. Dosering afhængig af lokale vandforhold: 0,8 ml/1,0 g pr. liter vand ved hårdheder op til 6 °dH (max. 3,2 ml/4 g pr. liter).



Suma[®] Med Alu L10

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, lysegul væske	Vægtfylde (20 °C)	1,27
pH-værdi ved 1% opløsning	12,0		

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af MGDA (kalkbinder), silicat (korrosionsinhibitor), natriumhydroxid (fedtløser), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk) og fosfonat (hindrer udfældning af kalk og beskytter rødgods).

Emballagestørrelser

Varenummer	Emballage	Type
7522976	2x5 L	Dunke

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Kun til professionel brug.

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Miljøoplysninger

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat
- Bortskaf den tomme rengjorte emballage som affald til genanvendelse.
- Sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation

Godkendelser

CE-mærket i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger.

Svanemærket under licensnr. 3080 0001.

Øvrige forhold

Anvendes SumaMed Alu L10 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken og inden for sygehussektoren, også aluminium. Anvendes med forsigtighed på kobber og messing.