

Suma Med Super LpH

Flydende maskinopvaskemiddel

Beskrivelse

Suma Med Super LpH er et koncentreret specialmiddel til vask af emner som kirurgiske instrumenter, personlige hjælpemidler, bækkener, vaskefade m.v.

Egenskaber

Suma Med Super LpH er et flydende specialmiddel, formuleret til anvendelse på en lang række instrumentvaskemaskiner, bækken skylle, fadevaskere m.m.. Produktets unikke sammensætning gør det lavalkalisk samtidig med at det effektivt løsner smuds og binder vandhårdheder således at det giver et særdeles flot vaskeresultat. Selv i hårdt vand undgås kalkopbygninger på emner og maskiner.

Fordele

- Løser effektivt smuds og indtørret blod
- Forhindrer kalkopbygning på bækkener/vaskefade og i maskinen
- Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi
- Kan anvendes til vask af kørestole og personlige hjælpemidler i specielle maskiner

Brugsanvisning

Suma Med Super LpH anvendes normalt sammen med Diversey's automatiske doseringsudstyr eller tilsvarende udstyr. Den anbefalede dosering er min. 1ml/ltr. vand. Den aktuelle doseringsforskrift afhænger af lokale vandforhold

Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar gul
pH-værdi i koncentrat:	$11.5 \leq 12.0$
pH-værdi (1 % opløsning):	Ca. 11
Vægtfylde (20°C):	1.15 g/cm^3

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som en specifikation

Indhold og funktion:

Vandig opløsning af MGDA (kalkbinder), fosfat (kalkbinder) og kaliumkarbonat (fedtløser)

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat Sikkerhedsdatablad

Opbevaring:

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur

Anbefalet opbevaringstemperatur:

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C



Suma Med Super LpH

Holdbarhed:

2 år i uåbnet emballage. Holdbarhed efter åbning er den samme, under forudsætning af at produktet ikke forurenes, og at man begrænser fordampningen af produktet.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Med Super LpH** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer indenfor sygehussektoren

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7517689	2x5 ltr.	Dunk
7517688	20 ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuén 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

www.diversey.dk

Juni 2017